

マグフィット® SX2

- 軟組織と硬組織との沈下量の差をアジャストするスライド機構
- ラボサイドでも磁石構造体の義歯への合着が可能
- 義歯の複合的な動きに対応可能
- 即日治療可能




仕様

基本性能

| 製品名 | | Lタイプ | Sタイプ | |
|-------|------------|--------|--------|------|
| 吸引力 | | 600gf | 400gf | |
| 漏洩磁場 | | 0.003T | 0.002T | |
| 各部の寸法 | 磁石構造体 (mm) | 外径 ① | Ø5.2 | Ø4.7 |
| | | 高さ ② | 1.6 | 1.4 |
| | キーパー式 (mm) | 吸着面径 ③ | Ø3.7 | Ø3.3 |
| | | 高さ ④ | 7.7 | 7.5 |


医療機器認証番号 マグフィットSX2: 21700BZZ00144000

構造及び材質

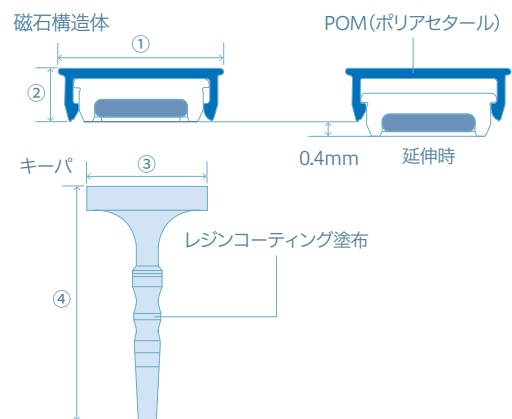

義歯の複合的な動きへの対応

義歯の動きに合わせて上下方向に最大で0.4mm、または8°傾斜することが可能です。キャップの嵌合力(脱着試験)は約15kgfです。

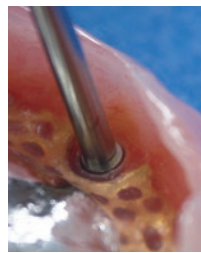

圧縮時



延伸時

義歯に合着した磁石構造体の動き

使用上の注意

- プラスチックキャップが口腔内での長期使用により劣化する場合があります。
- リライン時に付属品のメタルスペーサが必要になります。

付属品

以下のアクセサリを同梱しています。

- ① プラスチックダミー: 磁石構造体合着のスペースを確保します。
- ② ワッシャタイプスペーサ: 義歯の沈下空隙を確保します。
- ③ メタルスペーサ: 磁石の垂直的な沈下量補正のスペースを確保します。

